


MONTAJE PARA LA INYECCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlo

lipografter®

- 1 Retire todos los elementos del AT-Valve® y cambie la tapa al puerto disponible del mismo tal y como se representa en el diagrama.
- 2 **2a** » Ajuste la jeringa al AT-Valve® y abra el Luer-Lock.
2b » Conecte la cánula al lado opuesto del AT-Valve®.
- 3 Conecte el tubo de la bolsa de recolección en el puerto restante.
- 4 Abra el clip de la bolsa para permitir que el tejido adiposo fluya a través del dispositivo.
- 5 Utilice una jeringa de menor volumen para extraer la grasa de la bolsa de recolección y deposítela por medio de la cánula de inyección.

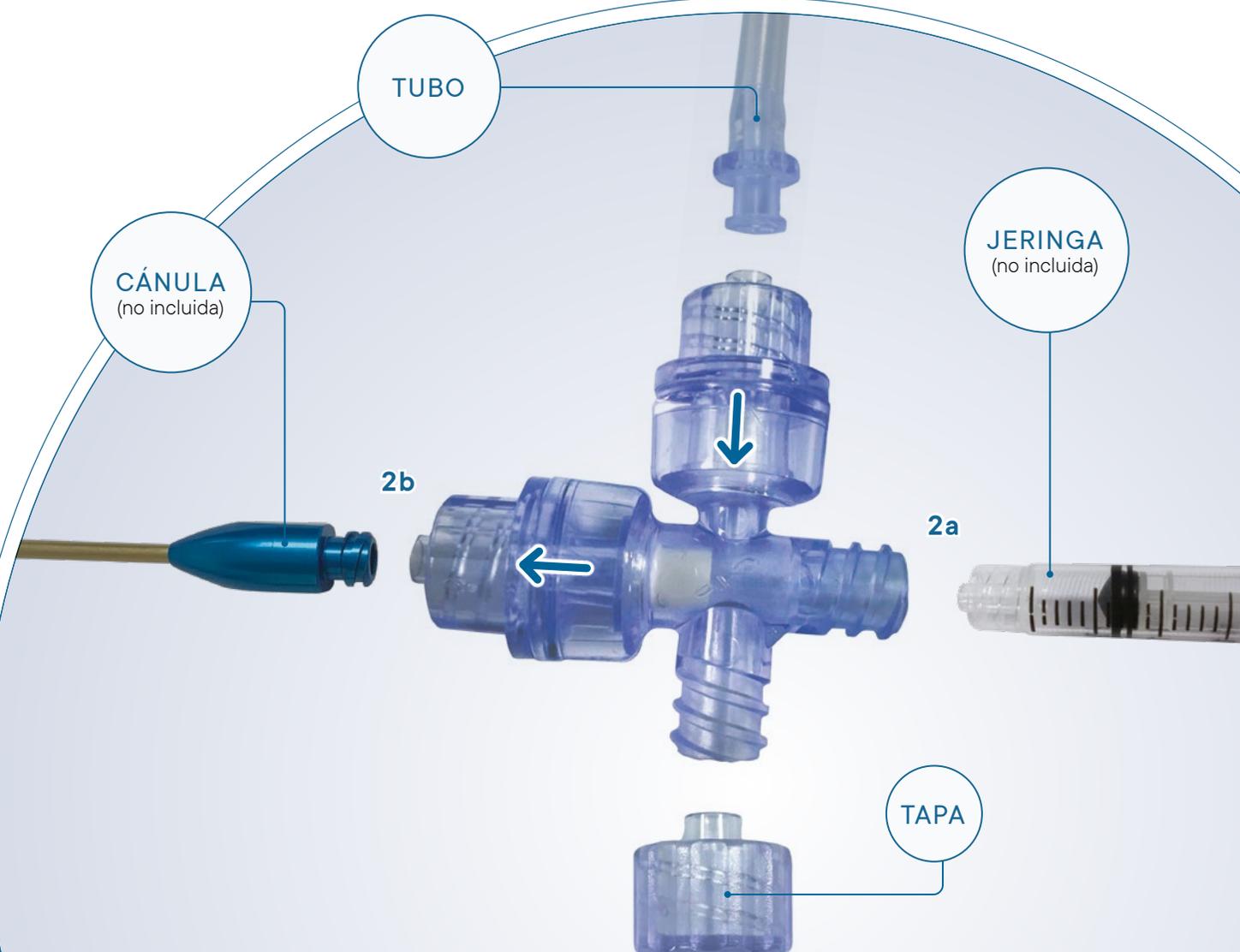

Distribuidor Internacional
POLYTECH

* NO AJUSTE DEMASIADO LOS COMPONENTES

LipoGrafter®, KVAC® y AT-Valve® son marcas registradas de Lipocosm LLC.

lipografter®

MONTAJE PARA LA RECOLECCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de utilizarlo



Materiales incluidos en el paquete:

- » Sistema KVAC® LipoGrafter® (dispositivo de recolección al vacío)
- » Válvula atraumática del tejido (AT-Valve® y tapa)
- » Set de tubos y bolsas para LipoGrafter®
 - › 4 bolsas de almacenamiento (250 ml cada una)
 - › Tubos para la conexión de los componentes

Otros materiales requeridos (no incluidos en el kit):

- » Juego de cánulas (cánulas de pequeño diámetro y cánula de recolección) y cánulas de inyección con conexión Luer-Lock
- » Jeringa Luer-Lock
- » Aguja afilada (se recomienda una aguja de gran calibre)

- 1 Asegúrese de que la tapa transparente esté atornillada al AT-Valve®.
- 2 Conecte el KVAC® para abrir el Luer-Lock.
- 3 Una el tubo directamente al AT-Valve®.
- 4 Acople la bolsa de almacenamiento al AT-Valve®.
- 5 Conecte la cánula al lado opuesto del tubo.

Distribuidor Internacional

POLYTECH

✳ NO AJUSTE DEMASIADO LOS COMPONENTES

LipoGrafter®, KVAC® y AT-Valve® son marcas registradas de Lipocosm LLC.